




危険! お取扱い注意 ステッキ本来の使い方をしてください!


1. 身体に合った長さの杖を選んでください。使いづらい長さは事故の原因となり、危険です。
2. ご使用前に必ず各部の点検をしてください。万一異常が認められた時は、使用しないでください。《インナーゴムのすり切れ、グリップのキズやヒビ、シャフトのキズ、先ゴムの異常、ジョイントの変形やツブレなど…》
3. グリップ以外の所を持って歩かないでください。また前後に極端に斜めにして使わないでください。危険です。
4. 使用前使用中含め、支柱の継目や長さ調節が確実に固定されている事を確認して使用してください。
5. 小石や段差のフチなどに先ゴムを乗せないでください。接地の不安定な状態での使用は危険です。地面に先ゴム全体を乗せ、安定した状態でご使用ください。また、段差にもご注意ください。
6. 道路側溝や凹みのある場所では、杖先がはまり込む危険があるので、十分注意してください。また、先端を隙間に入れてこじったり、物を突いたり、叩いたりしないでください。
7. 用途以外（例えば、登山用、トレッキングポール、護身用等）には使用しないでください。
8. 濡れた、又は凍った路面や、雪道、滑り易い所では十分注意してください。止むを得ず使用する場合は、杖だけに頼らず同伴者などの支えを得てください。
9. 雷の音が聞こえたり、落雷の恐れのある時は使用しないでください。危険です。
10. 先ゴムが摩耗したり、破れた時は使用を止め、速やかに交換してください。取替えの際は、専用品を使用し、説明書に従い確実に取付けてください。中途半端な取付けは危険です。
11. 先ゴムは必ず装着してください。外したまま使用すると、小石が挟まつたりして非常に危険です。
12. お子様が遊び道具にしないようご注意ください。

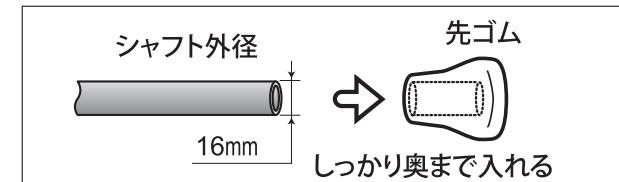

注意! 折畳み時や保管時の注意事項

1. 使用後は水分汚れ等を拭き取り、屋内の乾燥した場所で、直射光の当たらない所に保管してください。長期間直射光に当たり湿気を帯びると各部の劣化や退色等の原因になります。
2. 手入れを行う時は、乾いた柔らかい布を使用し、中性洗剤以外は使用しないでください。他の洗剤やシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品の変質、劣化の原因となります。
3. 油やオイルなどの潤滑剤は使用しないでください。シャフトの固定が不安定になり危険です。
4. インナーゴムにゆるみ・損傷等の異常があるときは、使用をおやめください。
5. 高温の場所(暖房器具の近くや夏場の自動車内等)や、低温の場所に放置しないでください。インナーゴムや各部の劣化の原因となります。
6. 寒冷地など低温の場所に折畳んだまま放置すると、使用時にインナーゴムの弾性が回復しない場合があります。このような時は、ゴムの弾性が回復してからご使用ください。
7. 長期間使用しない時は、ゴムの張力を保つため、シャフトは折畳まず、伸ばしたまま保管してください。

注意! ストラップ(手革)の取り扱い

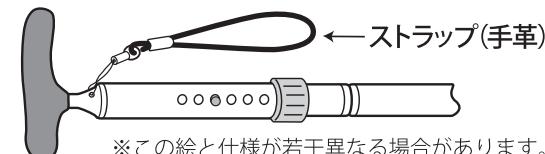

1. 本品は牛本革を使用しています。尖ったもの等の接触・衝撃によりスレやキズが付きやすいので、ご注意ください。
2. 本革の性質上、汗や雨、雪などで濡れると色落ちする場合があります。ご注意ください。濡れた場合は柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しをしてください。
3. 本手革は組立部品に金属を使用しています。引っ掛け等で破損する場合もあります。扱いにご注意ください。

この製品は(財)製品安全協会が定めた認定基準に適合しており、安心してご使用頂けます。



SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

賠償についてのご注意

- 万が一事故が起きた時は、事故の原因となった製品の確認が必要です。事故品を紛失しないよう保存・保管をお願いします。
- この制度はSGマーク製品そのものが故障したとしても、その製品について補償するというものではありません。

有効期限はご購入後3年間です。

アフター・サービスについて

この製品や部品の修理等については、お買上げ店にご相談ください。修理の際には改良品や、同等の代替品を使わせて頂くことがあります。



GRAND KAINOS

DONNA

折畳み式杖 取扱説明書



注意!

- この杖は、杖を持たなくても自立歩行できる人が、より安定した歩行をするために、補助的に使用するものです。
- 次のような方は危険ですので使用しないでください。
 1. 杖が無くては歩行できない人。(手摺りなどに伝わらなければ歩行できない人や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない人など)
 2. リハビリ中などのように、体重の一部を支えない歩けない人。ただし、医師などの指導の元で使用する場合はこのかぎりではありません。
- ※ご購入後に上記のような症状が出た場合も使用は中止してください。

この度は当社製品をお買上げ頂き、ありがとうございます。

- ★本製品を正しく安全に長くご使用頂くために、この説明書は必ずお読みください。
- ★内容をご理解頂き、記載の危険、注意事項をお守りください。
- ★いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。
- この取扱説明書の他にも、説明書やタグが付属している時は、それも一緒に保管をお願いします。
- ※取扱説明書で使われている絵は、解り易くするために若干誇張・簡略化してあり、実物と異なる箇所もあります。また改良等のため仕様が異なる場合もありますのでご了承ください。



●ハイキング・山歩きには使用しないでください。

このステッキはタウンユースの歩行補助を目的に設計製作されています。

●改造はしないでください。

お客様による修理、分解、改造等は危険なため、絶対にしないでください。

●杖に頼りすぎると肩や手を傷める恐れがあります。

また転倒などから思わぬ大事故につながる危険があります。

本製品について、お気付きの点や不明点がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。




株式会社 **シナノ**

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1
TEL. 0267-67-3324 お客様係

《ホームページアドレス》
<http://www.kainos.jp>

この取扱説明書は
GK+DONNA取扱説明書

各部の呼称と使用方法

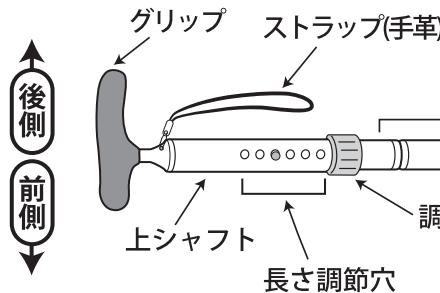


長さ調節方法

1. 調節プロテクターを左方向に回して緩めます。
2. 右ページ「正しい長さの選び方」を参考に、あなたの身長に合った長さ調節穴にボタンを掛け、長さを決めます。
3. 調節プロテクターを右方向に回してシャフトを固定します。
4. 歩いてみて長さが合わない時は、再度前後の調節穴にボタンを移動させ、歩き易い長さに再調整してください。

グリップの正しい握り方

シャフト中心に荷重がかかるように、グリップ全体を握ってください。

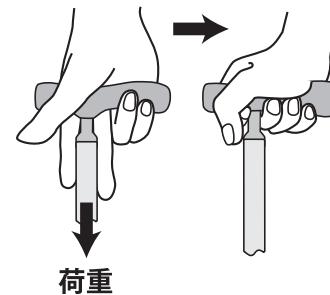

注意! 黒檀グリップについて

- 黒檀グリップは、木製で最も高級な黒檀材を使用しています。よく手に馴染み、程よい手触りとソフトな使用感のあるグリップですが、表面が柔らかいため、キズ付きやすい性質もあります。また経時変化により、ヒビ割れなどが発生する場合もありますので、ご注意ください。
- 雨や汗で濡れた場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しをしてください。
- 不用意に立掛けたり、物に当てるなど、こすれたり打痕でキズがつく恐れがあります。ご注意ください。

危険!

グリップの一部分だけを握ると、荷重が偏り非常に危険です。思わぬ事故につながる恐れもありますので、絶対にしないでください。



注意! アクリルグリップについて

- アクリルグリップは、アクリル製で一品一品削りだし作業により加工されています。そのため、形状に若干の差異がありますので、ご了承ください。
- 直射日光の当たる場所に置くと、退色・劣化等の原因となりますのでご注意ください。
- グリップで物を叩いたり、強い衝撃を与えないでください。破損する危険があります。


※この絵は、解り易くするために若干誇張・簡略化しています。
また仕様が異なる場合もあります。

シャフトの組立

危険!

1. 折畳んだ継ぎシャフトは、使用時、インナーゴムの張力で自力接合されます。(右図参照)。ステッキを取り出す時は、周囲に注意し、安全な方向に向けて広げてください。また、指などを挟まないようにご注意ください。
2. インナージョイントが、継ぎシャフトに確実に挿入され、ガタツキがないことを確認してからご使用ください。


折畳んだステッキを取り出すと、インナーゴムの張力でひとりでに組立ちます。

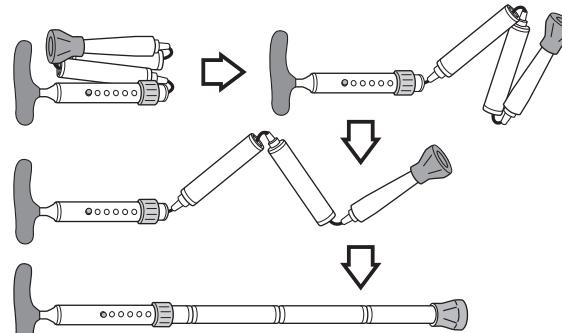


継ぎシャフトがシッカリと固定されているか確認する。

収納方法


1. 最初に調節プロテクターを回して緩めます。
2. ボタンを一番上の調節穴に移動し、長さを短くします。

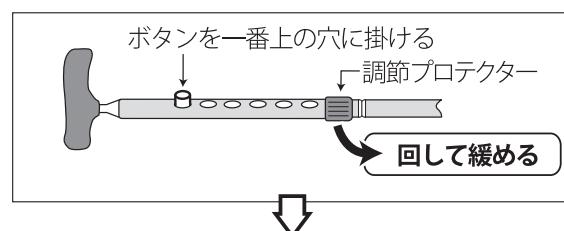

3. 継ぎシャフトの一方を引張るとインナーゴムが伸び、インナージョイントが外れます。

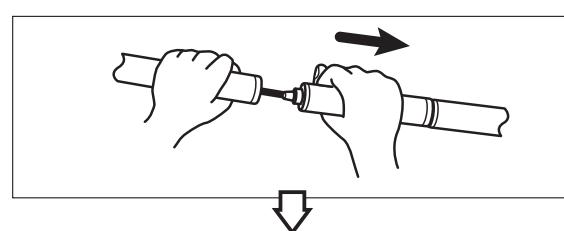

4. そのまま各継ぎシャフトを折曲げ、携帯用袋等に収納します。

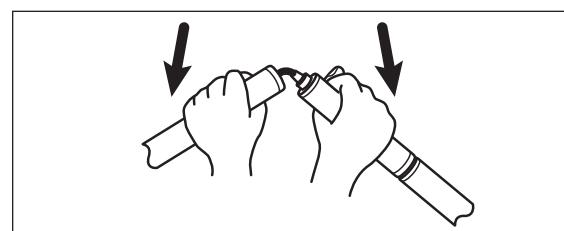


注意!

頻繁に折畳みを繰り返すと、ジョイントに当たった部分のシャフトがこすれ、塗装面にキズが付くことがあります。ご注意ください。

正しい長さの選び方

杖の先端を、足先の前外方向20cmに置いた時、肘の角度が30~40度になる長さが、使い易い長さの目安です。

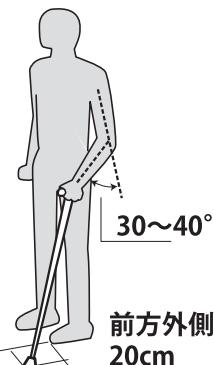

前方外側
20cm

身長と杖の長さ参考数値 cm

身長	杖の長さ	身長	杖の長さ	身長	杖の長さ
140	72	154	79	168	86
142	73	156	80	170	87
144	74	158	81	172	88
146	75	160	82	174	89
148	76	162	83	176	90
150	77	164	84	178	91
152	78	166	85	180	92

危険!

長さ調節後は、ボタンが確実に穴に掛かっていることを確認してください。また、調節プロテクターがしっかりと締まっていることも確認してください。しっかりと固定されていないとシャフトが急に縮むなど事故の原因となり、危険です。